

Vuodesuoja

95120LL

Käyttöohje



Ohjeversio 1.0
12.10.2023

Symbolit

Alla kuvataan käyttöohjeessa ja muissa laitteen merkinnöissä käytetyt symbolit.

	Lääkinnällinen laite
	CE-merkki

Laitteen nimi

Vuodesuoja

Laitteen valmistajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Suomen Sairaalatukku Oy

Osoite: Unajantie 4, 26840 Kortela

Puhelin: 02-8387 2480

Sähköposti: asiakaspalvelu@sairaalatukku.com

Vaatimustenmukaisuus

Suomen Sairaalatukku Oy:n valmistama Vuodesuoja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen MDR (EU) 2017/745 vaatimukset ja on luokan I CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Vuodesuojalle on testattu ja hyväksytty paloturvalluokitukset ISO 12952-1:2010 sekä ISO 12952-2:2010 mukaan.

HUOMIO

Käyttäjän ja/tai potilaan tulee ilmoittaa kaikki tähän Vuodesuojaan liittyvät vakavat vaaratilanteet sekä valmistajalle että sen EU-jäsenmaan valvovalle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas ovat.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	95120LL
Koko	95x120 cm
Tuotteen kuormitus	Max. 250 kg
Suunniteltu käyttöikä	3-5 vuotta (käytöstä ja pesukerroista riippuen)

Suunniteltu käyttötarkoitus

Vuodesuoja on tarkoitettu vuodepotilaan siirtämisen ja kääntämisen apuvälineeksi hoitohenkilöstölle ja hoitohenkilöstön opastamana myös kotihoitoon. Lisäksi se toimii makuuasennossa olevan potilaan inkontinenssisuojana.

Suunnitellut käyttäjät

Vuodesuojan suunnitellut käyttäjät ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja heidän opastuksellaan toimivat henkilöt kotihoidossa, sekä potilaat.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja heidän opastuksellaan toimivat henkilöt kotihoidossa siirtävät ja kääntävät vuodepotilasta esimerkiksi liu'uttamalla häntä lakanan nostolenkkien ja liukulakanan avulla.

Potilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on toimintarajoite tai terveydentila, jonka vuoksi hän on vuodelevossa terveydenhuollon yksikössä tai kotihoidossa. Potilaan fyysinen toimintakyky on heikentynyt ja hän tarvitsee apua liikkumiseen. Toimintarajoitteen tai terveydentilan lievityksen tai kompensoinnin takia terveydenhuollon hoitohenkilökunta on katsonut vuodesuojan käytön perustelluksi.

Indikaatiot

Vuodesuojaa käytetään vuodepotilailla, jotka tarvitsevat apua vuoteessa liikkumiseen, kuten siirtymiseen tai kääntymiseen. Vuodesuojan nostolenkkien ja liukulakanan avulla terveydenhuollon ammattilaiset tai heidän opastuksellaan kotihoidossa toimivat henkilöt voivat liikuttaa potilasta turvallisesti, tehokkaasti ja ergonomisesti. Lisäksi nesteitä imevä pintakuiva kangas laminoidulla nestesululla suojaa makuulla olevan potilaan ihoa inkontinenssitapauksissa.

Vasta-aiheet

Vuodesuoja ei sovellu

- bariatrisille potilaille, koska laitteen suunniteltu kantavuus max. 250 kg

Lisäksi laitetta ei ole tarkoitettu

- koneelliseen nostoon
- manuaalisen noston apuvälineeksi
- pestäväksi huuhteluaineella

Varastointi ja käsittely

Tee tuotteen vastaanottotarkistus sen saapuessa.

Varastoi tuote kuivassa tilassa kuten normaalit vuodevaatteet.

Kliiniset hyödyt

Vuodesuojan suunnitellut kliiniset hyödyt ovat:

- potilas saadaan turvallisesti siirrettyä tai käännettyä vuoteessa
- terveydenhuollon ammattilaiset ja heidän opastuksellaan toimivat henkilöt kotihoidossa voivat siirtää ja kääntää potilasta tehokkaasti ja ergonomisesti
- suojaa potilaan ihoa ja vuodetta inkontinenssitapauksissa

Vuodesuojan käyttö

Tarkista aina ennen tuotteen käyttöä että se on ehjä. Rikkiäistä vuodesuojaa ei tule käyttää.

Vuodesuoja 95120LL:ssa on huomioitu kolme eri toimintoa: se on yhdistelmä vuodesuojaa, liukulakanaa ja siirtolakanaa.

Vuodesuoja on kehitetty helpottamaan ergonomisia ongelmia potilaiden kääntämisessä ja siirtämisessä.

Vuodesuojan poikittaisliukuva satiinipohja poistaa kitkan, ja reunoissa suojan alapuolella olevista kahvoista (6 kpl) saa hyvän käsiotteen suojan keventämiseen siirtoa varten.

Suojan pohjassa oleva satiinikangas on aseteltu siten, ettei tuote siirry pituussuunnassa pois asetetulta paikaltaan. Vääränsuuntainen liukuminen on estetty alapuolella olevalla, kitkaa lisäävällä reunakankaalla. Näillä tuotteen ominaisuuksilla siirrot hoituvat helposti.

Nesteitä imevä pintakuiva kangas laminoitulla nestesululla toimii vuodesuojana.

Hoitohenkilöstön tulee tehdä potilaan siirtäminen ja kääntäminen vuodesuojalla hoitosuunnitelman mukaan, tarvittavan usein, sekä välttämällä nopeita ja rajuja liikkeitä, jotta ehkäistään aiheuttamasta potilaalle painehaavoja tai pahentamasta olemassa olevia painehaavoja.

Vuodesuojan puhdistus

Pese vuodesuoja tarvittaessa sen likaannuttua.

- Pese max. 85 asteessa
- Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa +16-39 asteessa
- Silitys ei sallittu
- Valkaisuaineiden käyttö ei sallittu

- Huuhteluaineen käyttö ei sallittu

VAROITUS

Huuhteluaineen tai valkaisuaineen käyttö haurastuttaa tuotteen vinyylikerrosta ja tuote voi päästää nesteitä läpi.

Tuotteen kuivaaminen pesuohjeen vastaisesti aiheuttaa suojan sisällä olevien muovikalvojen sulamisen ja vuodesuojan muuttumisen ryppyiseksi.

Vuodesuojan käytöstä poisto ja hävittäminen

Älä käytä tuotetta jos se on vioittunut.

Tuotteen arvioidaan kestävän kotiooloissa noin 400 pesukertaa.

Hävitä tuote joko kierrättämällä tai sekajätteenä.

Laita likaiset, homeiset ja märät suojat sekajätteeseen.