

Saila pelastuslakana



Tuotekoodi	781200
Koko	75cm x 160cm
Hinta	62,12 €

Vetohihnan pituus on 4m

Pelastuslakana asetetaan vuoteeseen patjan alle niin, että vetopään turvavyö tulee kainaloiden kohdalle.

Yläturvavyö kiristetään sopivan tiukaksi potilaan jäädessä patjoineen ja peittoineen turvavyön sisään.

Toinen turvavyö kiristetään jalkojen yli.

Tämän jälkeen turvavyöt aukaistaan ja kiinnitetään yhteen sängyn alla, jolloin vyöt ovat poissa tieltä ja valmiiksi säädettyinä mahdollista evakuointia varten.

[Katso esite](#)

Evakuointia suoritettaessa lukot aukaistaan sängyn alta ja kiinnitetään potilaan rinnan yli kainaloiden kohdalta, toinen jalkojen päältä.

Patja nostetaan nostokahvojen avulla lattialle ja vedetään vetohihnan avulla ulos. Patjan yläosa jää vedettäessä hieman koholleen lattiasta, jolloin potilaan pää on suojassa kolhuilta.