

Huoparengas

Tuotekoodi

926008



S/M koon huoparenkaita on 12 kpl/pss

L koon huoparenkaita on 8 kpl/pss

Irrota huoparengas suoja-paperista ja kiinnitä se puhtaalle ja kuivalle iholle. Kevennettävä alue tai kipukohta kohdistetaan renkaan keskelle. Jalkapohjassa käytettäessä leikkaa huoparenkaaseen lovi, jotta paine jakautuu tasaisesti. Samaa huoparengasta voi pitää iholla korkeintaan 16 h vuorokaudessa. Poista mahdolliset liimajäämät lämpimällä vedellä, ei alkoholipitoisella aineella. Tuote ei kestä kastelua.

- suojaa ihoa hankaukselta ja vähentää painetta iholla, lievittää siten kipua liikuttaessa
- iso L-kokoinen huoparengas (Ø 4,5 cm) vähentää vaivaisenluuhun kohdistuvaa painetta sekä keventää kovettumia, kehräsluuta, kantapäätä ja päkiää
- S/M-kokoinen (25 mm) huoparengas vähentää känsään ja syyliään kohdistuvaa painetta
- kiinnittyy iholle liimapinnan ansiosta, ihoystävällinen materiaali

Nimi	Koodi	Hinta
Huoparengas S/M halk.3,0cm	9260080	11,92 €
Huoparengas L halk.4,5cm (5kpl/pss)	9260082	8,79 €