

X6 Täyttöpakkaus, verensokeriliuskat 50 kpl

Tuotekoodi	X6GLU
Hinta	27,22 €



Quicktestin verensokeriliuskoja käytetään Quicktest Multitest X6 kanssa, saat nopean ja selkeän yleiskatsauksen verensokeriarvostasi muutamassa sekunnissa.

Reaktioaika: 5 sekuntia

Mittausalue: 0,56-44,4 mmol / L

Pakkaus sisältää: 50 verensokeriliuskaa, 50 steriiliä lansettia sekä ohjekirjan.

HUOM! Huomioi, että Quicktest-verensokeriliuskat vaativat Quicktest Multitest X6-laitteen toimiakseen.

Miten se toimii?

Mittaus suoritetaan helposti verinäytteenotolla sormenpäältä, mukana toimitettujen kertakäyttölansettien avulla. Aseta verensokeriliuska Quicktest X6 Multitest-laitteeseen (laite ostettava erikseen, laitetta voidaan käyttää uudelleen ja se pystyy analysoimaan esim. kolesterolia, laktaattia jne. - lue lisää täältä) Kosketa verensokeriliuskan kärjellä veripisaraa, nyt veri imeytyy automaattisesti sormenpäältä - kun reaktiosolu on saanut tarpeeksi verta, analyysi alkaa automaattisesti, vastauksen saat muutamassa sekunnissa. Saat tarkan arvon verensokeritasostasi. Quicktest X6 -analyysillä on korkea luotettavuus ja se on tietysti CE-merkitty.

Quicktest X6 tallentaa myös tuloksiasi, jotta voit helposti seurata arvojasi. Klikkaa "Ohjevideo" -painiketta ja näet videon Quicktest X6:n käytön helppoudesta. Verensokeriliuskat toimitetaan näppärässä purkissa, joka on helppo avata ja sulkea, jolloin liuskat ovat aina puhtaita ja

suojattuja kosteudelta jne.